

Dual

Wechseldruck- und Weichlagerungs-System


Dual ist ein Wechseldruck- und Weichlagerungs-System. Je nach Bedarf können die 20 Luftkammern des Matratzen-Ersatzsystems mit wechselndem oder gleichbleibendem Druck betrieben werden.



Weichlagerungs-
und Wechsel-
drucksysteme



Hebe- und
Transferlösungen

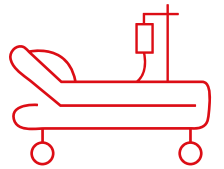

Schwerlast- und
Intensivbetten



OP- und
Temperatur-
management



Wieder-
aufbereitungs-
center



Home Care
Produkte

AirSystems

Medizinische Produkte GmbH

Das System ist ideal für ein Patientengewicht von 30 bis 200 kg. Die Dual Steuereinheit ermöglicht drei unterschiedliche Wechseldruckzyklen mit Intervallen von 10, 15 oder 20 Minuten. Bei Wahl der Weichlagerung wird der Matratzendruck auf Basis des gewählten Gewichts auf gleichbleibendem Niveau gehalten und bei Änderung der Position kontinuierlich angepasst.

Die Matratze wird durch einen flüssigkeitsdichten, atmungsaktiven Bezug geschützt.

Die Dual ist zur Prophylaxe bei Patienten mit niedrigem bis hohem Dekubitusrisiko und zur Dekubitus-therapie bis Kategorie 4 (gemäß EPUAP) einsetzbar.

Dual Steuergerät

- Wechseldruck in 3 Zyklen einstellbar
- Weichlagerungsfunktion
- Sitzfunktion
- Maximaldruckfunktion für Pflege und Mobilisation
- Patientengewicht – 30 kg bis 200 kg einstellbar
- Optischer und akustischer Alarm bei Leckage oder Stromausfall
- Automatische Drucküberwachung
- Erinnerungsfunktion – automatische Speicherung der letzten Einstellungen
- Automatische Tastensperre



Matratzenersatz-System

- 20 austauschbare Luftzellen (Bild 1)
- Transportfunktion
- Flüssigkeitsdichter und atmungsaktiver Bezug und Kammern
- CPR-Funktion (Bild 2)
- Abmessung 200x85x17 cm, weitere Größen erhältlich

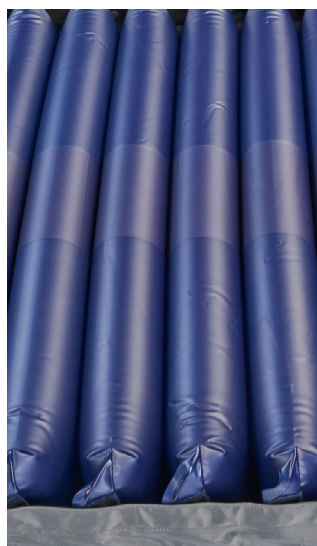


Bild 1



Bild 2

Artikel-Nr.	Produkt
PDUAL-400	Dual Wechseldruck- und Weichlagerungs-System
Technische Daten	
Zertifizierung	CE
Risikoklasse	MPG-Klasse 1



Mehr Informationen zu diesem Produkt



AirSystems
Medizinische Produkte GmbH
 Siemensstr. 1 | D-46325 Borken
 Tel.: +49 (0) 2861 80990-0
 Fax: +49 (0) 2861 80990-29
 info@airsystems.de | www.airsystems.de